

# SONESTA S2 & S3

## Onderhoud & Reinigen

### Onderhoud

Test het apparaat wekelijks op een juiste werking en inspecteer kabels op scheuren en andere schade. Vervang de betrokken onderdelen bij twijfel. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd, zoals hieronder wordt beschreven. Aanvullend preventief onderhoud is vereist in overeenstemming met de Servicehandleiding.

### Reinigen

- Voor ontsmetting moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
- Veeg alle oppervlakken schoon na ieder gebruik door een patiënt.
- U wordt aanbevolen het stoelkussen na ieder gebruik te verwijderen om de oppervlakken onder het stoelkussen en de achterkant van het stoelkussen schoon te vegen.
- Maak de stoel schoon met een vochtige doek en normale ontsmettingsmiddelen. Volg de ingestelde protocollen voor het verwijderen van lichaamsvloeistoffen van de oppervlakken van de stoel.
- Gebruik een van de hieronder vermelde aanbevolen ontsmettingsmiddelen op alle oppervlakken. Indien niet beschikbaar, gebruikt u een ontsmettingsmiddel met een bleekoplossing van 1:10 (5,25% natriumhypochloriet).

#### **Aanbevolen ontsmettingsmiddelen:**

- PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH ® desinfecterend doekje: Bacteriedodend wegwerpdoekje.
- Clorox HealthCare Disinfecting Wipes ®



**WAARSCHUWING:** Het niet of niet goed schoonmaken van de stoel na ieder gebruik zal leiden tot een verminderd uiterlijk en verminderde prestaties.



**WAARSCHUWING:** Ontsmettingsmiddelen op basis van jodofoor (zoals betadine) kunnen vlekken achterlaten op de kussens.



**WAARSCHUWING:** Langdurig contact met bleekoplossingen met onjuiste verhoudingen in reinigingsmiddelen kan schade veroorzaken aan zowel het uiterlijk als de prestaties.