

SONESTA S2 & S3

Underhåll & Rengöring

Underhåll

Testa produktens funktioner en gång i veckan och kontrollera att kablarna inte är skadade. Byt defekta eller skadade delar. Rengör produkten regelbundet enligt anvisningarna nedan. För ytterligare förebyggande underhåll, se servicemanualen.

Rengöring

- Produktens stickkontakt måste dras ur eluttaget före all desinficering.
- Torka av alla ytor efter varje patientbesök.
- Vi rekommenderar att sitsen tas bort efter varje användning. Torka av ytorna under sitsen och sitsens undersida.
- Rengör stolen med en fuktig trasa och vanligt desinfektionsmedel. Följ gällande föreskrifter för att rengöra stolens ytor från kroppsvätskor.
- Använd ett av de rekommenderade desinfektionsmedlen nedan på alla ytor. Om de inte finns tillgängliga, använd ett desinfektionsmedel med 1:10 utspädning av blekmedel (5,25 % natriumhypoklorit).

Rekommenderade desinfektionsmedel:

- PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH ® Bleach Wipe: bakteriedödande engångsduk.
- Clorox HealthCare Disinfecting Wipes ®



WARNING: Bristfällig eller ingen rengöring efter varje användning av stolen kan skada stolens prestanda och utseende.



WARNING: Desinfektionsmedel av jodofortyp (t. ex. betadine) kan ge fläckar på sits, ryggstöd och nackkudde.



WARNING: Långvarig kontakt med blekmedelslösningar med fel spädningskvot i ett rengöringsmedel kan skada både prestandan och utseendet.