

SONESTA S2 & S3

Wartung & Reinigung

Wartung

Wöchentlich die einwandfreie Funktionsweise des Produkts testen, Kabel auf Beschädigungen jeder Art überprüfen. Im Zweifelsfall betroffene Komponenten austauschen. Das Produkt entsprechend der Beschreibung unten regelmäßig reinigen. Zusätzliche Wartungsmaßnahmen gemäß der Beschreibung im Wartungshandbuch ausführen.

Reinigung

- Das Produkt vor dem Desinfizieren vom Netz trennen.
- Nach jeder Nutzung durch einen Patienten alle Oberflächen abwischen.
- Es wird empfohlen, das Sitzpolster nach jeder Nutzung abzunehmen und die Flächen unter dem Sitzpolster sowie seine Rückseite abzuwischen.
- Zum Reinigen des Stuhls ein feuchtes Tuch und herkömmliche Desinfektionsmittel verwenden. Zur Entfernung von Körperflüssigkeiten von den Stuhloberflächen entsprechend den geltenden Protokollen vorgehen.
- Für alle Oberflächen die unten genannten Desinfektionsmittel verwenden. Wenn diese nicht verfügbar sind, Desinfektionsmittel mit einem Bleichmittelanteil von 1:10 verwenden (5,25 % Natriumhypochlorid).

Empfohlene Desinfektionsmittel:

- PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH®-Tücher: Germizide Einwegtücher.
- Clorox HealthCare®-Desinfektionstücher



WARNUNG: Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß bzw. nicht nach jeder Nutzung gereinigt wird, beeinträchtigt dies sein Erscheinungsbild und seine einwandfreie Funktionsweise.



WARNUNG: Bei Verwendung jodhaltiger Desinfektionsmittel (z. B. Betadine) sind Flecken auf den Polstern möglich.



WARNUNG: Bei längerem Einwirken von Bleichlösungen in falschen Konzentrationen sind Beeinträchtigungen von Erscheinungsbild und einwandfreier Funktion möglich.